

CAREai ライトシリーズ 使い方

1

センサーが反応



2

ペンダントが鳴ります

「**□対応**」ボタンで音を止め、
表示されたセンサーまで様子を見に行きます。



3

安全を確認してから 通知をリセット

ペンダント画面が「対応」表示の間は再通知しないので、
気にせずケアに入れます。 ※5分間で自動リセットされます

安全を確認できたら、退室する際に
「**○リセット**」ボタンで通知を消去



完了

センサーを停止しておきたい…

停止したいセンサーの送信機から操作してください



- 「**5分停止**」ボタン で 一時停止
※5分が経過すると自動でONに戻ります。
- 「**ずっと停止**」ボタン で 完全停止
※再度同じボタンを押さない限り、ずっと停止状態です。

