

CAREai スタンダードシリーズ 使い方

1

センサーが反応



OR



OR



OR



2

親機とペンダントが鳴ります

親機

「リセット」ボタンで音を止め
(ペンダントは鳴り続けます)



ペンダント

「□対応」ボタンで音を止め
(親機・他のペンダントの音も止まります)



表示されたセンサーまで様子を見に行きます

3

安全を確認してから通知をリセット

画面に番号表示が残っている間は再通知しないので、気にせずケアに入れます
※5分間で自動リセットされます

親機

「リセット」ボタンを長押し



ペンダント

「○リセット」ボタンを押す



ケアが終わったら、退室して通知を消去

完了

センサーを一時停止しておきたい…

停止したいセンサーの子機から操作してください
正面「一時停止」ボタンを長押しで10分間停止します

